

GUIDE D'INSTALLATION DES BIBLIOTHEQUES LABSIDE AXIOM®

3Shape®

Version minimum requise : 18.1.0.

ATTENTION :

Si vous mettez à jour la bibliothèque "Labside", veuillez à supprimer tous les fichiers de la bibliothèque "Flexibase" avant.

Installation :


- Ouvrir 3Shape® Dental System puis Control Panel.
- Sélectionner import/export :




- Lire le fichier *Anthogyr_Labside(MB)_3shape_V2.01.04.dme*.
- Fermer Control Panel.
- Redémarrer 3Shape® Dental System.

Utilisation :

- Ouvrir un nouveau travail et sélectionner une dent.
- Cliquer sur le bouton pilier et sélectionner la catégorie "Anthogyr_Labside" :

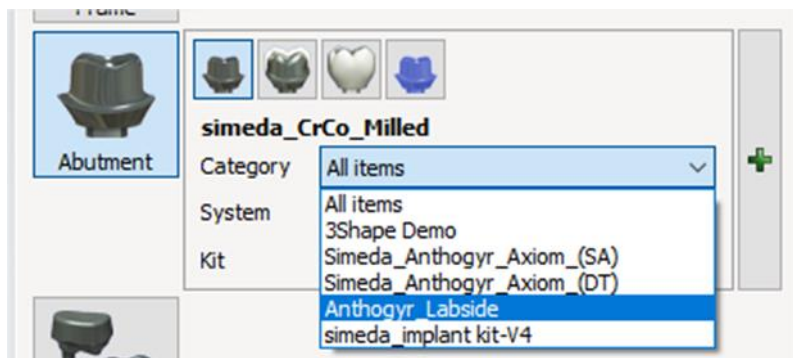

→ Sélectionner le système :

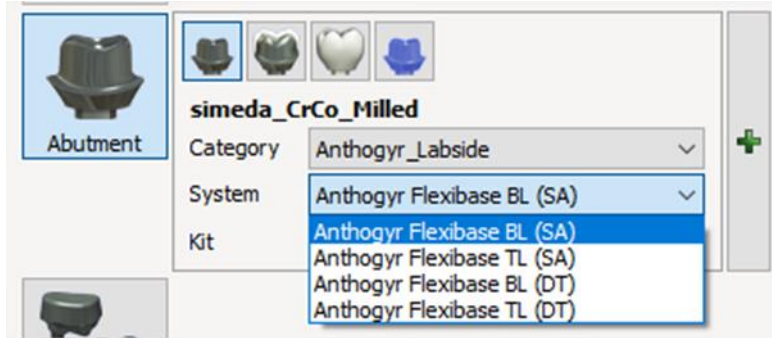

→ Sélectionner le groupe de connexions et le type de connexion : (puis démarrer le scan)

