

GUIDE D'INSTALLATION DES BIBLIOTHEQUES FLEXIBASE® AXIOM®

3shape®

versions compatibles : 2.9.9.5 et supérieure

Installation :


- Décompresser le fichier *3shape.zip*
- Ouvrir 3shape® Dental System puis Control Panel
- Sélectionner import/export :




- Lire le fichier *Anthogyr Flexibase_3shape_V2.01.02.dme*
- Fermer Control Panel
- Redémarrer 3shape® Dental System

Utilisation :


- Ouvrir un nouveau travail et sélectionner une dent
- Cliquer sur le bouton pilier et sélectionner la catégorie "anthogyr-FlexiBase" :

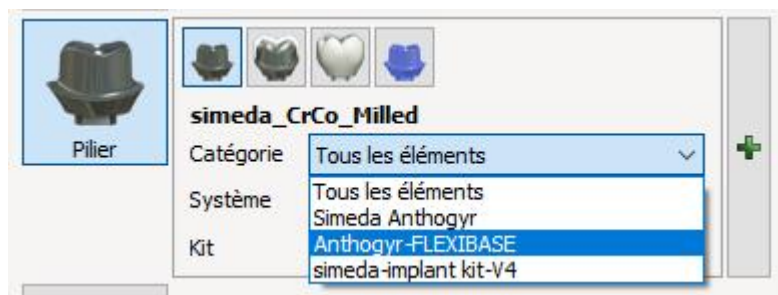


- Sélectionner le système :

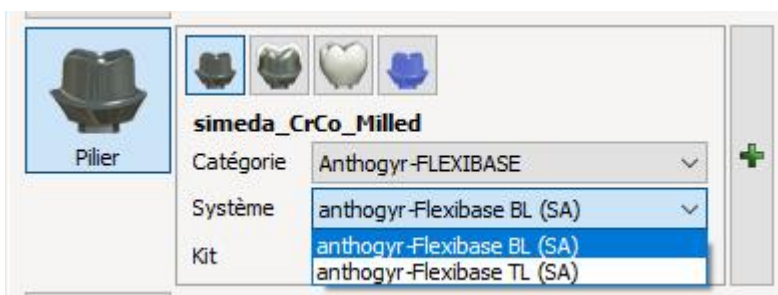

→ Sélectionner l'embase : (puis démarrer le scan)



Pilier

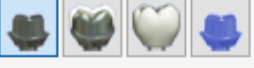

+

simeda_CrCo_Milled

Catégorie Anthogyr-FLEXIBASE ▾

Système anthogyr-Flexibase BL (SA) ▾

Kit Flexibase BL 4.0 H1.5 (152-27-SAA) ▾

Flexibase BL 4.0 H1.5 (152-27-SAA)


Flexibase BL 4.0 H2.5 (152-27-SAA)

Flexibase BL 4.0 H3.5 (152-27-SAA)


Flexibase BL 5.0 H1.5 (152-27-SAA)

Flexibase BL 5.0 H2.5 (152-27-SAA)


Flexibase BL 5.0 H3.5 (152-27-SAA)



Divers



Pilier

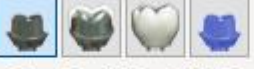

+

simeda_CrCo_Milled

Catégorie Anthogyr-FLEXIBASE ▾

Système anthogyr-Flexibase TL (SA) ▾

Kit Flexibase TL N 4.0 (156-0X-SAA) ▾

Flexibase TL N 4.0 (156-0X-SAA)

Flexibase TL R 4.8 (156-0X-SAA)

