

GUIA DE INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS FLEXIBASE® AXIOM®

3shape®

versões compatíveis : 2.9.9.5 e superiores

Instalação :


- Descompactar o ficheiro *3shape.zip*
- Abrir o 3shape® Dental System e, de seguida, o Control Panel
- Selecionar import/export:




- Ler o ficheiro *Anthogyr_Flexibase_3shape_V2.01.02.dme*
- Fechar o Control Panel
- Reiniciar o 3shape® Dental System

Utilização :

- Abrir um novo trabalho e seleccionar um dente
- Clicar no botão pilar e seleccionar a categoria “anthogyr-FlexiBase” :

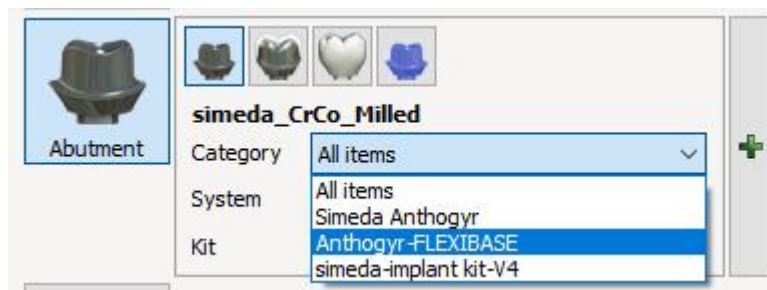

- Selecionar o sistema :

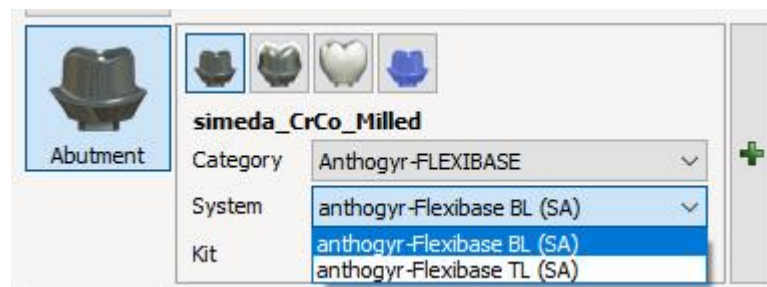

→ Selecionar a base: (e depois reiniciar o scan)

