

# GUIA DE INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS LABSIDE AXIOM®

## 3Shape®

Versões compatíveis : 18.1.0. e superiores.


### ATENÇÃO :

Certifique-se de que apaga todos os ficheiros da biblioteca «Flexibase» antes de atualizar a biblioteca «Labside».

### Instalação :

→ Abrir o 3Shape® Dental System e, de seguida, o Control Panel.

→ Selecionar import/export :

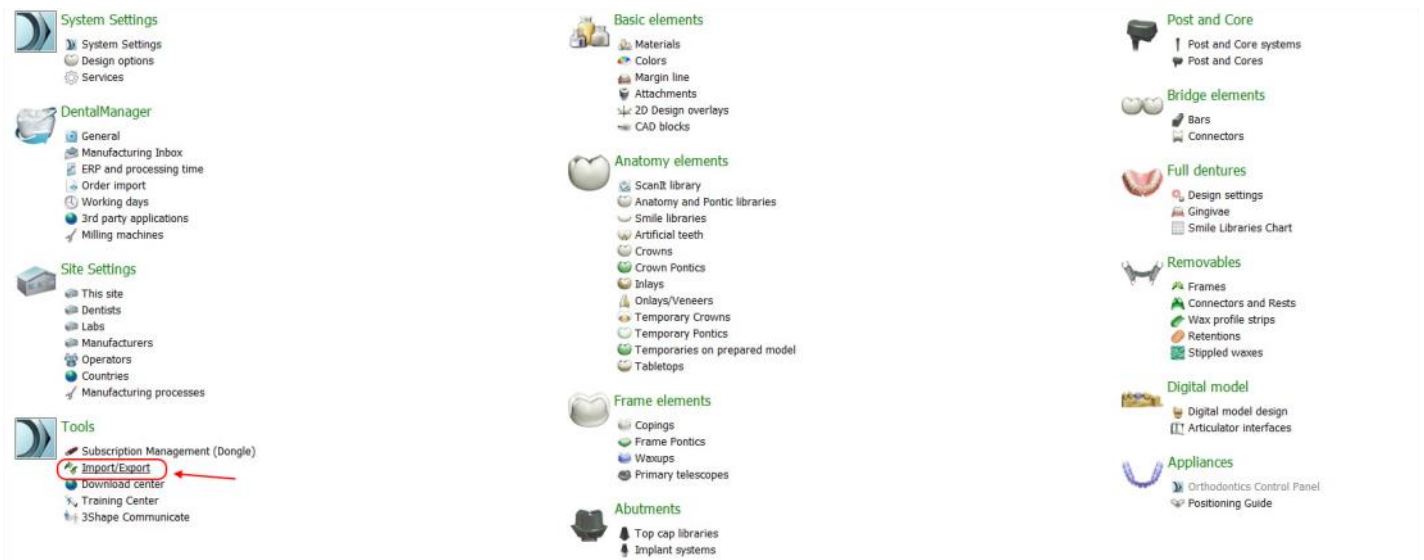

→ Ler o ficheiro *Anthogyr\_Labside(MB)\_3shape\_V2.01.04.dme*.


→ Fechar o Control Panel.

→ Reiniciar o 3Shape® Dental System.


### Utilização :

→ Abrir um novo trabalho e selecionar um dente.

→ Clicar no botão pilar e selecionar a categoria “Anthogyr\_Labside” :

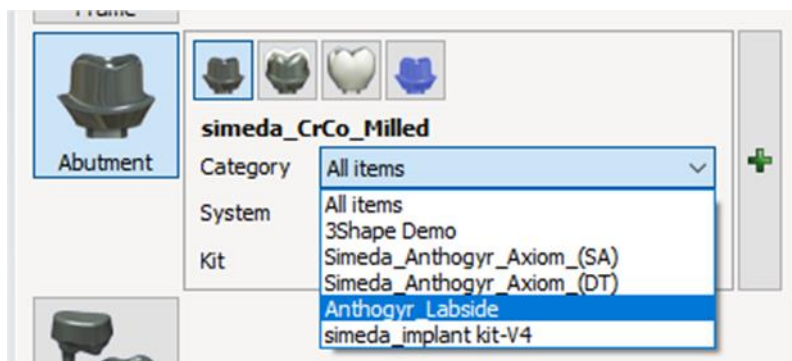

→ Selecionar o sistema :

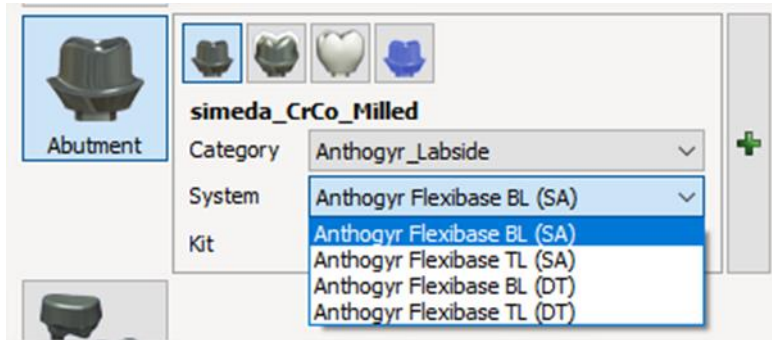

→ Depois seleccione o grupo de conexão e o tipo de conexão.

